

150-10-6

Báscula médica digital a nivel de la cintura
Versión de software 11525

Manual técnico



© Rice Lake Weighing Systems. Todos los derechos reservados.

Rice Lake Weighing Systems® es una marca comercial registrada
de Rice Lake Weighing Systems.

Cualquier otra marca o nombre de producto en este documento son marcas comerciales
o registradas de sus empresas respectivas.

Todo información detallada en este documento es, según nuestro leal saber y entender,
completa y fidedigna a la fecha de publicación. Rice Lake Weighing Systems
se reserva el derecho de modificar la tecnología, características, especificaciones y
diseño del equipo sin previo aviso.

La versión más reciente de esta publicación, software, firmware y
cualquier otra actualización de productos está disponible en nuestro sitio web:

www.ricelake.com

Historial de revisiones

En este apartado se describen y se realiza un seguimiento de las revisiones anteriores del manual para conocer las principales actualizaciones y cuándo tuvieron lugar.

Revisión	Fecha	Descripción
B	18 de agosto de 2022	Establecido un historial de revisiones; formateo del contenido para adaptarlo a otros manuales médicos; versión de software 11525
C	9 de diciembre de 2024	Instrucciones revisadas para la sustitución de pilas
D	6 de agosto de 2025	Especificaciones actualizadas
E	15 de enero de 2026	Apartados actualizados de montaje, funcionamiento, mantenimiento y especificaciones

Tabla i. Historial de letra de revisión



Rice Lake Weighing Systems ofrece seminarios de capacitación técnica. Puede consultar la descripción y las fechas de los cursos en www.ricelake.com/training o llamando al 715-234-9171 y preguntando por el departamento de capacitación.

Índice

1.0	Introducción	5
1.1	Conformidad con la FCC	5
1.2	Desechado	5
1.3	Seguridad	6
2.0	Montaje	7
2.1	Desembalaje	7
2.1.1	Reembalaje de la báscula	7
2.2	Montaje de la báscula	7
2.2.1	Montaje de las ruedas	8
2.2.2	Fijar la segunda columna a la primera	9
2.2.3	Insertar las pilas alcalinas	10
2.2.4	Conexión eléctrica	10
3.0	Operación	11
3.1	Pantalla	12
3.2	Pesaje	12
3.3	Función de retención/liberación	13
3.4	Uso de la función de índice de masa corporal (BMI)	13
3.5	Solución de problemas	14
4.0	Configuración	15
4.1	Navegación general	15
4.1.1	Cambiar parámetros	15
4.1.2	Introducir números	15
4.1.3	Guardar y volver al menú principal	15
4.2	Modo de configuración	16
4.3	Menú del modo de programación	17
4.4	Menú predeterminado	22
4.5	Calibración de la báscula	22
4.6	Menú de prueba	23
5.0	Comunicación	24
5.1	Impresión por teclado de pulsadores	24
5.2	Conexión USB	25
6.0	Mantenimiento	27
6.1	Mantenimiento básico	27
6.2	Limpieza	27
6.3	Sustitución de pilas alcalinas	27
6.4	Sustitución de pilas recargables	28
6.5	Mantenimiento periódico	28
7.0	Especificaciones	29



Rice Lake ofrece continuamente videos de capacitación en web de un conjunto creciente de asuntos relacionados con productos sin costo alguno. Visite www.ricelake.com/webinars

1.0 Introducción

La báscula médica digital 150-10-6 está diseñada de forma eficiente para proporcionar mediciones de peso precisas, fiables y repetibles. Está equipada con un asa y dos ruedas traseras de alta resistencia para facilitar su transporte.



Los manuales están disponibles Rice Lake Weighing Systems en www.ricelake.com/manuals

Encontrará información sobre la garantía en www.ricelake.com/warranties

1.1 Conformidad con la FCC

Estados Unidos

Se ha comprobado que este equipo cumple los límites para dispositivos digitales de Clase A de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites se han previsto para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en entornos comerciales. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. El uso de este equipo en una zona residencial puede provocar interferencias dañinas que el usuario deberá corregir por cuenta propia.

Canadá

Este dispositivo digital no supera los límites de Clase A para las emisiones de ruido radioeléctrico de aparatos digitales establecidos en los reglamentos sobre interferencias radioeléctricas del Departamento de Comunicaciones de Canadá.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la Class A prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

1.2 Desechado



Desechado del producto

El producto debe llevarse a los centros de recolección de residuos separados adecuados al final de su ciclo de vida.

Una adecuada recogida selectiva para reciclar el producto ayuda a prevenir posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud, y promueve el reciclaje de los materiales. Los usuarios que eliminen el producto de forma ilegal se enfrentarán a las sanciones administrativas previstas por la ley.

Desechado de las baterías

Deseche las baterías en centros de recolección de residuos apropiados al final de su ciclo de vida de acuerdo con las leyes y regulaciones locales. Las baterías y baterías recargables pueden contener sustancias nocivas que no deben desecharse con la basura doméstica. Las baterías pueden contener sustancias nocivas que incluyen, entre otras, cadmio (Cd), litio (Li), mercurio (Hg) o plomo (Pb). Los usuarios que eliminen las baterías de forma ilegal se enfrentarán a las sanciones administrativas previstas por la ley.



ADVERTENCIA: Riesgo de incendio y explosión. No queme, aplaste, desmonte ni cortocircuite las baterías. No sustituya la batería por otra del tipo incorrecto.

1.3 Seguridad

Definiciones de seguridad:



PELIGRO: Indica una situación de peligro inminente que, en caso de no evitarse, causará lesiones graves o la muerte. Incluye riesgos producidos al retirar los protectores.



ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría provocar lesiones graves o la muerte. Incluye riesgos producidos al retirar los protectores.



PRECAUCIÓN: Indica una situación de peligro potencial que, en caso de no evitarse, podría causar lesiones leves o moderadas.



IMPORTANTE: Indica información sobre procedimientos que, en caso de no respetarse, podrían producir daños en el equipo o deterioro y pérdida de datos.

Seguridad general



No utilice el equipo a menos que se hayan leído y comprendido todas las instrucciones. No seguir las instrucciones o considerar las advertencias puede causar lesiones graves o fatales. Contacte con cualquier distribuidor de Rice Lake Weighing Systems para obtener manuales de reemplazo.



ADVERTENCIA

No considerar lo siguiente puede causar lesiones graves o fatales.

Asegúrese de que todas las personas que operan o trabajan con esta unidad hayan leído y comprendido toda la información de seguridad.

No transporte la báscula mientras haya alguien en ella.

No permita que menores de edad (niños) o personas no experimentadas utilicen esta báscula.

No utilice junto a material inflamable.

No utilice este producto si cualquiera de sus componentes está suelto o agrietado.

No utilizar cerca del agua.

No utilice la báscula sobre superficies deslizantes, como piso mojado.

No utilice esta báscula cuando el cuerpo o los pies de una persona estén mojados, como después de bañarse.

No introduzca los dedos en las ranuras ni donde haya riesgo de que queden aprisionados.

Para evitar la contaminación cruzada, limpie la báscula de forma periódica.

Antes de limpiar, asegúrese de que la báscula esté desconectada del tomacorriente.

Las personas con discapacidades o físicamente débiles deben ser ayudadas por otra persona al utilizar esta báscula.



IMPORTANTE

No deje caer la báscula ni la esponja a impactos violentos.

No salte sobre la báscula.

Para obtener un pesaje preciso, la báscula se debe colocar sobre una superficie estable y plana.

El funcionamiento a tensiones y frecuencias distintas de las especificadas podría dañar el equipo.

Evite el contacto con una humedad excesiva.

No altere ni modifique la báscula.

Rice Lake Weighing Systems ofrece adaptadores de CA opcionales; el uso de un adaptador no suministrado por Rice Lake Weighing Systems anula todas las garantías y aprobaciones.

Un peso superior a la capacidad máxima puede dañar la báscula.

2.0 Montaje

2.1 Desembalaje

Coloque la caja sobre una superficie dura y nivelada para desembalarla, preferiblemente en la zona donde vaya a utilizarla. Las piezas contenidas en la caja de envío incluyen:

- Báscula (la base y la columna montada)
- Este manual
- Caja blanca con la etiqueta **Parts Inside** que contiene lo siguiente:
 - Ruedas (2)
 - Bisagra de rueda (1)
 - Tornillos de cabeza plana (8)
 - Pilas AA (6)

2.1.1 Reembalaje de la báscula

Todos los componentes han sido envueltos en plástico. Conserve el embalaje para utilizarlo en caso de que deba devolver o trasladar la báscula. Debe embalarse adecuadamente con material de embalaje suficiente. Siempre que sea posible, utilice la caja de cartón original cuando envíe la báscula de vuelta.



IMPORTANTE: La garantía no cubre daños provocados por un embalaje inadecuado.

2.2 Montaje de la báscula

Siga los pasos siguientes para instalar la báscula.



NOTA: Para la instalación necesitará un destornillador de estrella.

1. Coloque la báscula sobre una superficie dura y nivelada para obtener los pesajes más precisos en una zona en la que se vaya a realizar el procedimiento.
2. Saque con cuidado la báscula del material de embalaje. levántela por la base.



IMPORTANTE: La base y la columna de la báscula están conectadas por un cable y se requiere mucho cuidado al sacarlas de la caja para que el cableado no se dañe.



Figura 2-1. Cableado de conexión entre la plataforma y la columna de la báscula

3. Pase suavemente el cable sobrante por la parte superior de la columna de la báscula para eliminar cualquier exceso de cable en la parte inferior de la columna. Esto eliminará la posibilidad de pellizcar el cable mientras se conecta la columna a la base de la báscula.

4. Fije la columna de la báscula a la base como se muestra en la [Figura 2-2](#) asegurándose de no pellizcar el cable.



Figura 2-2. Fijar la columna a la base de la báscula

5. Utilizando los tornillos adjuntos, fije la columna a la base de la báscula como se muestra en la [Figura 2-3](#).



Figura 2-3. Fijar con tornillos

2.2.1 Montaje de las ruedas

Fije el conjunto de ruedas a la báscula antes de conectar la segunda columna. Para fijar las ruedas, siga estos pasos.

1. Fije las dos ruedas a la barra de montaje de las ruedas como se muestra en la [Figura 2-4](#).



Figura 2-4. Fijar el conjunto de ruedas

2. Fije el conjunto de ruedas a la báscula con un tornillo de cabeza Phillips y apriételo con un destornillador.

2.2.2 Fijar la segunda columna a la primera

Una vez fijado el conjunto de ruedas, termine el montaje de la báscula siguiendo las siguientes instrucciones.



NOTA: Asegúrese de que el cable sale por la parte superior de la columna inferior para poder enchufarlo en la segunda columna (superior).

1. Enchufe el cable de la columna inferior en la columna superior.



Enchufe el conector
en la columna superior



Figura 2-5. Extender el cable por la columna de la báscula

2. Una vez conectado el cable, coloque la columna superior sobre la inferior, alineando los orificios de los tornillos. Asegúrese de que el cable no quede pinzado.

Asegúrese de que los
orificios de los tornillos
están alineados

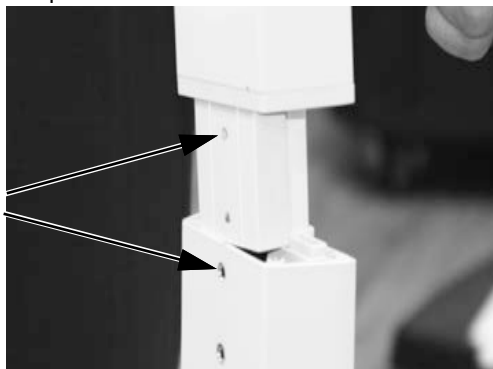


Figura 2-6. Insertar la columna superior en la columna inferior

3. Fíjela con dos tornillos utilizando un destornillador de estrella.

2.2.3 Insertar las pilas alcalinas

Las seis pilas AA suministradas con la báscula proporcionan una media de 25 horas de uso continuo.

Para instalar las pilas:

1. Gire el tornillo en el sentido antihorario y retire la tapa de las pilas.
2. Introduzca las pilas en el compartimento tal y como se muestra en la ilustración.



Figura 2-7. Cámara de pilas

3. Coloque la tapa en su sitio y gire el tornillo en sentido horario para fijarla.



NOTA: Retire las pilas antes de guardar el producto si no va a utilizarlo durante un periodo de tiempo prolongado.



NOTA: Si se activa el indicador LO BAT, para obtener un pesaje preciso, sustituya las pilas o conecte la báscula a una fuente de alimentación CA lo antes posible.

2.2.4 Conexión eléctrica

Puede utilizar un adaptador de CA opcional cuando disponga de una toma de corriente.



IMPORTANTE: Utilice solo adaptadores de corriente suministrados o adquiridos a Rice Lake Weighing Systems. El uso de un adaptador de corriente que no sea de Rice Lake Weighing Systems anula la garantía.



Figura 2-8. Sitio de conexión eléctrica



NOTA: El indicador de pilas de la pantalla se apaga cuando se utiliza una conexión de CA. El brillo de la retroiluminación se reduce al 60% cuando se utilizan las pilas.

3.0 Operación

Este apartado describe el panel frontal e incluye los procedimientos para el funcionamiento de la báscula.



Figura 3-1. Teclado del panel frontal

Descripción de teclas

La unidad dispone de nueve teclas en el panel frontal. Las funciones de las teclas se describen en la tabla siguiente.

! IMPORTANTE: Las teclas del panel frontal son muy sensibles, por lo que basta con pulsarlas suavemente.

Tecla	Nombre	Función
 On/Off	On/Off	Enciende o apaga la báscula.
 Print LB/KG	Print LB/KG	Envía datos desde el puerto RS-232. Permite alternar entre kilogramos y libras siempre que esté activado en el modo Configuration . No se puede conmutar mientras se está en el modo BMI .
 Zero	Zero	Solo funciona si el peso actual es estable e inferior al 2% de la capacidad de la báscula. Todo lo que supere el 2% requiere una recalibración.
 Hold Release	Hold Release	Muestra el valor de peso más actual en la pantalla y mantiene ese valor cuando el paciente se baja de la báscula. Una segunda pulsación libera el valor del peso. No activo mientras esté en modo BMI .
 BMI	BMI	Pulsando la tecla BMI se accede al modo BMI (Índice de Masa Corporal) (predeterminado al encender la báscula). El paciente se sube a la báscula, el peso se estabiliza y se pulsa la tecla BMI . A continuación, la pantalla solicita la altura del paciente para calcular su IMC.
 CLEAR	CLEAR	Cuando utilice la función BMI, la pantalla buscará una entrada de altura. Al pulsar Clear , esta entrada vuelve a 190,0 cm (predeterminado) o 5 pies, 7,5 pulgadas. Una vez visualizado BMI, al pulsar la tecla Clear se sale de BMI.
 ENTER	ENTER	Se utiliza para aceptar la altura en el modo BMI , acepta el valor del último parámetro introducido y pasa a la etapa siguiente. Si mantiene pulsada la tecla Enter durante el arranque, aparecerá el ID. Este es el primer ajuste al entrar en el modo de configuración.
	Flechas arriba/abajo	Ajusta el valor del dígito/número parpadeante. Ajusta la entrada de altura (0,5 pulg/0,5 cm) mientras está en el modo BMI .

Tabla 3-1. Funciones de teclas de la báscula

3.1 Pantalla

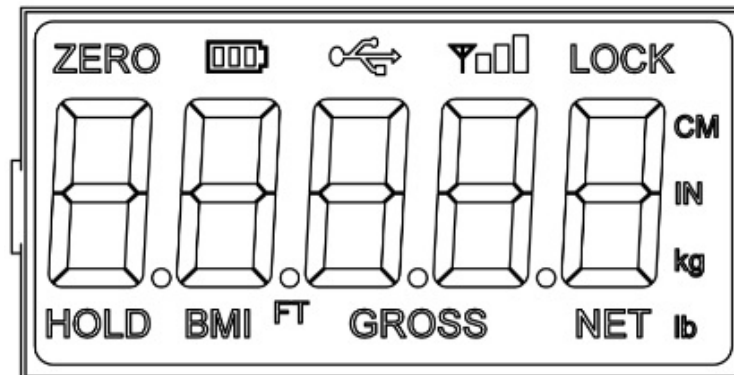


Figura 3-2. Pantalla

Pantalla	Descripción
ZERO	Báscula lista para pesar
Indicación de pila	Energía restante en las pilas
USB	USB conectado a la báscula
LOCK	El peso es estable y la pantalla se bloquea en el valor
CM	Unidad de longitud en el sistema de medida SI
IN	Unidad de longitud en los sistemas de medida imperial y propio de EE.UU
kg	Unidad de masa en el sistema de medida SI
lb	Unidad de masa en el sistema de medida imperial y propio de EE.UU
NET	Indica el valor del peso neto mientras la tara está activada
GROSS	Indica el valor ocho mientras la tara está desactivada
FT	Unidad de longitud en el sistema de medida imperial y propio de EE.UU
BMI	Indica que el cálculo del BMI está activado
HOLD	Indica que la lectura del peso permanecerá en pantalla hasta que se libere (pulsando de nuevo HOLD)
oz	Unidad de masa en los sistemas de medida imperial y propio de EE.UU

Tabla 3-2. Descripción de la pantalla

3.2 Pesaje

Siga los pasos siguientes para pesar a un paciente.

1. Pulse  para encender la báscula. Aparece **0.0** junto con **ZERO** en la pantalla superior.
2. Haga que el paciente se suba a la báscula. Aparece el peso del paciente, se enciende el anunciador **LOCK** y el indicador emite un pitido para indicar el final del proceso de pesaje.
3. Pulse  para cambiar la visualización de lb a kg y viceversa.
4. Mantenga pulsado  hasta que aparezca **OFF** para apagar la báscula.

3.3 Función de retención/liberación

Siga los siguientes pasos para utilizar la función de retención/liberación:

1. Pulse  para encender la báscula. Aparece **0.0** junto con **ZERO** en la pantalla superior.
2. Haga que el paciente se suba a la báscula.
3. Pulse  una vez que el peso del paciente se estabilice. El peso del paciente y los anunciadores **HOLD** y **LOCK** permanecen en la pantalla cuando el paciente está fuera de la báscula.
4. Pulse de nuevo  para devolver la báscula a cero.



NOTA: Si pulsa  antes de que el paciente se suba a la báscula también se mantendrá la indicación del peso.

3.4 Uso de la función de índice de masa corporal (BMI)

Siga los pasos siguientes para determinar el IMC.

Modo LB

1. Asegúrese de que la báscula está a cero.
2. Haga que el paciente se suba a la báscula.
3. Haga que la persona se suba a la báscula para obtener un peso. El anunciador **LOCK** aparece en la pantalla.
4. Pulse . Los anunciadores **BMI** y **FT/IN** se encienden y parpadea un valor de altura predeterminado de 5 pies y 7,5 pulgadas (5-07,5).
5. Utilice   para ajustar el valor de la altura y pulse .
6. El valor del IMC y el anunciador **BMI** se muestran en la pantalla. Pulse  para volver al modo de pesaje y la función BMI se desactivará.

Modo KG

1. Asegúrese de que la báscula está a cero.
2. Haga que el paciente se suba a la báscula para obtener su peso. En la pantalla aparece el anunciador **LOCK**.
3. Pulse . Aparecen los anunciadores **BMI** y **CM** y parpadea un valor de altura predeterminado de 170,0 cm (170.0).
4. Utilice   para ajustar el valor de la altura.
5. Pulse .
6. El valor del BMI y el anunciador **BMI** aparecen en la pantalla. Pulse  para volver al modo de pesaje y a la función BMI.

3.5 Solución de problemas

Consulte la siguiente tabla para comprobar y corregir cualquier falla antes de ponerse en contacto con el personal de servicio.

Síntoma	Causa posible	Medida correctiva
La báscula no se enciende.	Pilas agotadas	Sustituya las pilas o conecte a CA
	Enchufe eléctrico defectuoso	Utilice una salida eléctrica distinta.
	Fuente de alimentación defectuosa.	Sustituya el adaptador
Peso dudoso o la báscula no pone a cero	Un objeto externo interfiere con la báscula	Retire el objeto que interfiere de la báscula
	La pantalla no mostraba 0.0 antes de pesar	Ayude al paciente a bajarse de la báscula, póngala a cero y comience de nuevo el proceso de pesaje
	La báscula no está colocada sobre un suelo nivelado	Asegúrese de que la báscula está nivelada y comience de nuevo el proceso de pesaje
	La báscula no está calibrada	Compruebe el peso con una pesa de calibración certificada
La pantalla muestra un mensaje STOP	La carga supera la capacidad de la báscula	Retire el exceso de peso y utilice la báscula de acuerdo con las especificaciones de fabricación
La pantalla muestra el mensaje LO Bat	Las pilas tienen poca carga	Sustituya las pilas
La pantalla muestra los mensajes E y Err que se detallan a continuación		
E06	Identificador - ADC	AD demasiado alto
E07		AD demasiado bajo
E10	Sobrecarga	La báscula se ha sobrecargado. Retire la carga de la báscula
E4L	BAT	Pilas con poca carga, pero aún utilizables - queda una barra en el indicador de la pantalla
E4U		Pilas con poca carga e inestables - no quedan barras en la pantalla del indicador
E11	CAL	Error de calibración - recalibrar la báscula
Err 1	El cable de la celda de carga puede estar enchufado en un puerto de conexión incorrecto	Asegúrese de que el cable está conectado al puerto de conexión de la celda de carga. Nota: El punto de conexión de la celda de carga se encuentra debajo de la cubierta de plástico curvada del indicador. Retire los cuatro tornillos de retención traseros, retire la cubierta trasera curvada para acceder al punto de conexión de la celda de carga.
Err 2	Estado de saturación bajo (A/D bajo)	La celda de carga no está bien conectada. compruebe los cables y las conexiones mecánicas. si el problema persiste, sustituya el juego de celdas de carga
Err 3	Estado de saturación alto (A/D alto)	Ver Err 2
Err 6	Peso inestable. No se puede calibrar	Compruebe el entorno mecánico de la celda de carga y asegúrese de que nada entra en contacto con ella y de que los cables están bien soldados
Err 7	La báscula no se mueve	Asegúrese de que las patas están instaladas en la báscula. Gire las patas hasta el fondo y luego retírelas tres vueltas completas, luego nivele la báscula
SAT	Cable de la celda de carga dañado	Sustituya el cable de la celda de carga
	El cable de la celda de carga puede estar enchufado en un puerto de conexión incorrecto	Asegúrese de que el cable está conectado al puerto de conexión de la celda de carga. Nota: El punto de conexión de la celda de carga se encuentra debajo de la cubierta de plástico curvada del indicador. Retire los cuatro tornillos de retención traseros, retire la cubierta trasera curvada para acceder al punto de conexión de la celda de carga.

Tabla 3-3. Solución de problemas

4.0 Configuración

Las opciones y la configuración de los parámetros se realizan por medio de la configuración de la báscula. El acceso al interruptor de configuración se encuentra en el interior de la tapa de las pilas (se muestra a continuación).

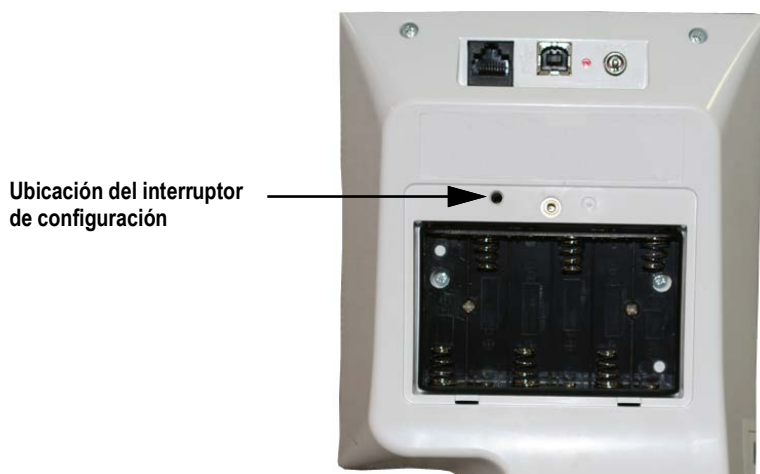


Figura 4-1. Ubicación del interruptor de configuración

4.1 Navegación general

Utilice los botones del panel frontal para navegar por los menús y parámetros.

4.1.1 Cambiar parámetros

- Pulse **BMI** para desplazarse por los menús y/o parámetros
- Pulse **ENTER** para entrar en un menú y/o parámetro visualizado
- Pulse **▲** o **▼** para desplazarse por los valores
- Pulse **ENTER** para guardar la selección mostrada y pasar al siguiente parámetro

4.1.2 Introducir números

- Pulse **ENTER** para introducir el valor del parámetro
- Pulse **▲** o **▼** para aumentar/disminuir los números
- Pulse **BMI** para pasar al siguiente dígito
- Pulse **ENTER** para guardar el valor y pasar al siguiente parámetro


4.1.3 Guardar y volver al menú principal

- Cuando la selección/valor de un parámetro sea correcta, pulse **ENTER**. Se muestra el siguiente parámetro
- Cuando todas las selecciones/valores de los parámetros son correctos, se muestra **GUARDAR**
- Pulse **ENTER**. Aparece el mensaje **DONE**.
- Pulse **ENTER** para guardar los ajustes y volver al modo de pesaje.

4.2 Modo de configuración

Siga los siguientes pasos para entrar en el modo **Configuration**.

1. Asegúrese de que la báscula esté apagada.
2. Encienda la báscula pulsando simultáneamente  y . Siga manteniendo pulsadas ambas teclas hasta que aparezca **Id**.
La unidad realiza un ciclo por medio de su función de arranque y continúa mostrando la versión del software.
3. Acceda al interruptor de configuración situado en la parte posterior de la báscula para introducir los parámetros de configuración de la báscula. Utilice un pequeño clip, un destornillador pequeño u otro objeto similar para pulsar el interruptor de configuración.
4. Una vez pulsado el interruptor de configuración, aparece **PROG**.
5. La báscula puede configurarse mediante una serie de menús a los que se accede por medio del panel frontal cuando la báscula está en modo **Configuration**.

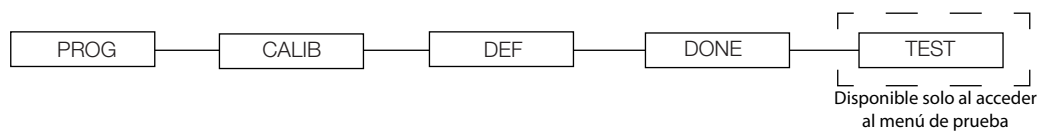

Consulte el [Apartado 4.6 en la página 23](#)

Figura 4-2. Menú de nivel superior

6. Pulse  para avanzar al menú deseado.
7. Pulse  y avance en el manual hasta la selección de menú correspondiente para obtener más instrucciones.

4.3 Menú del modo de programación

En el modo **Programming** se pueden ajustar varios parámetros.

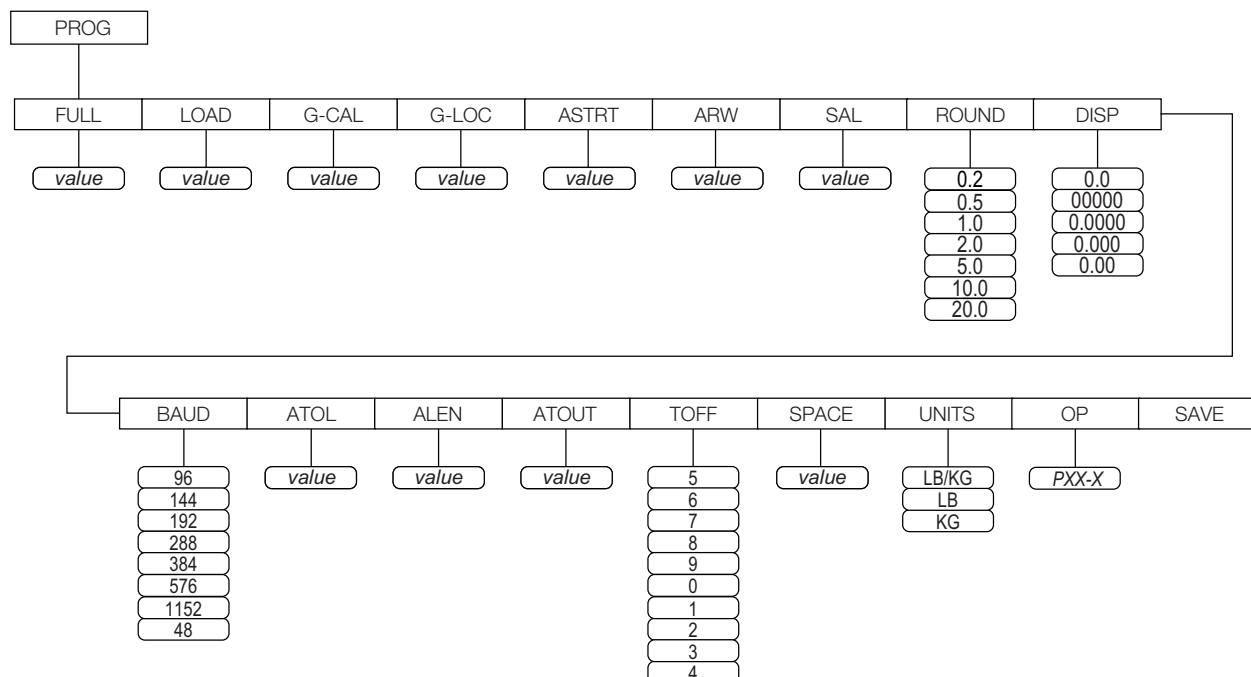


Figura 4-3. Estructura del menú del modo de programación

La siguiente tabla enumera los distintos mensajes de pantalla y la secuencia al configurar la báscula.

Parámetro	Descripción	Opciones	Pasos
FULL	Capacidad máxima de la báscula	Valor (<i>capacidad de báscula</i>)	La pantalla alterna entre un valor numérico y FULL. Si no desea cambiar el valor, pulse la tecla BMI para pasar al siguiente ajuste. Ejemplo: de FULL a LOAD. Si desea cambiar el valor, siga estos pasos: 1. Pulse la tecla ENTER para cambiar el valor empezando por el dígito situado más a la derecha. 2. Utilice las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar/disminuir los números. 3. Pulse la tecla BMI para desplazarse a la izquierda. 4. Utilice las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar/disminuir los números. 5. Pulse de nuevo la tecla BMI para desplazarse a la izquierda. 6. Utilice las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar/disminuir los números. 7. Cuando haya terminado pulse la tecla ENTER para pasar al siguiente parámetro (LOAD).

Tabla 4-1. Menú del modo de configuración

Parámetro	Descripción	Opciones	Pasos
LOAD	Esta es la cantidad de peso aplicada durante la calibración. También se puede cambiar en el menú de calibración	Valor (200 lb)	La pantalla alterna entre un valor numérico y LOAD . Si no desea cambiar este valor, pulse la tecla BMI para pasar al siguiente ajuste. Ejemplo: de LOAD a ASTART. Si desea cambiar el valor, siga los pasos siguientes: 1. Pulse ENTER para cambiar el valor empezando por el dígito situado más a la derecha. 2. Utilice las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar/disminuir los números. 3. Pulse la tecla BMI para desplazarse a la izquierda. 4. Utilice las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar/disminuir los números. 5. Cuando haya terminado, pulse la tecla ENTER para pasar al siguiente parámetro (G-CAL).
G-CAL	Calibración de la gravedad; fija la gravedad para la calibración original	00000	La pantalla alterna entre 00000 y G-CAL . Pulse la tecla BMI para pasar al siguiente ajuste. Si desea cambiar el valor, siga estos pasos. 1. Pulse ENTER para cambiar el valor empezando por el dígito situado más a la derecha. 2. Utilice las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar/disminuir los números. 3. Pulse la tecla BMI para desplazarse a la izquierda. 4. Utilice la tecla de flecha arriba/abajo para aumentar/disminuir los números. 5. Cuando haya terminado, pulse ENTER para pasar al nuevo parámetro (G-LOC).
G-LOC	Ubicación de la gravedad; establecer la gravedad para la ubicación	00000	La pantalla alterna entre 00000 y G-LOC . Pulse la tecla BMI para pasar al siguiente ajuste. Si desea cambiar el valor, siga estos pasos. 1. Pulse ENTER para cambiar el valor empezando por el dígito situado más a la derecha. 2. Utilice las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar/disminuir los números. 3. Pulse la tecla BMI para desplazarse a la izquierda. 4. Utilice la tecla de flecha arriba/abajo para aumentar/disminuir los números. 5. Cuando haya terminado, pulse ENTER para pasar al nuevo parámetro (ASTART).
ASTRT	Límite de inicio del proceso de pesaje — Máximo (capacidad total)/10. Determina cuándo se inicia el algoritmo de pesaje (cuando aparece "----"), por debajo de este valor la báscula mostrará el peso en vivo	Valor (2.0)	La pantalla alterna entre un valor numérico y ASTART . Si no desea cambiar este valor, pulse la tecla BMI para pasar al siguiente ajuste. Ejemplo: de ASTART a ARW. Si desea cambiar el valor, siga los pasos siguientes: 1. Pulse la tecla ENTER para cambiar el valor empezando por el dígito situado más a la derecha. 2. Utilice las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar/disminuir los números. 3. Pulse la tecla BMI para desplazarse a la izquierda. 4. Utilice las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar/disminuir los números. 5. Cuando haya terminado, pulse la tecla ENTER para pasar al siguiente parámetro (ARW).

Tabla 4-1. Menú del modo de configuración (continuación)

Parámetro	Descripción	Opciones	Pasos
ARW	Repesaje automático — Reinicia el algoritmo de pesaje si el peso cambió en más de este valor.	Valor (4.0 lb)	La pantalla alterna entre un valor numérico y ARW. Si no desea cambiar este valor, pulse la tecla BMI para pasar al siguiente ajuste. Ejemplo: de ARW a SAL. Si desea cambiar el valor, siga los pasos siguientes: 1. Pulse la tecla ENTER para cambiar el valor empezando por el dígito situado más a la derecha. 2. Utilice las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar/disminuir los números. 3. Pulse la tecla BMI para desplazarse a la izquierda. 4. Utilice las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar/disminuir los números. 5. Cuando haya terminado, pulse la tecla ENTER para pasar al siguiente parámetro (SAL).
SAL	Semiautomático en vivo — Este valor es el intervalo entre las visualizaciones del peso durante el proceso del algoritmo	Valor (0.5)	La pantalla alterna entre un valor numérico y SAL. Si no desea cambiar este valor, pulse la tecla BMI para pasar al siguiente ajuste. Ejemplo: de SAL a ROUND. Si desea cambiar el valor, siga los pasos siguientes: 1. Pulse la tecla ENTER para cambiar el valor empezando por el dígito situado más a la derecha. 2. Utilice las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar/disminuir los números. 3. Cuando haya terminado, pulse la tecla ENTER para pasar al siguiente parámetro (ROUND).
ROUND	Resolución de báscula — Valores en kg: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 Valores en lb: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200	0.2 0.5 1.0 2.0 5.0 10.0 20.0 0.1	La pantalla alterna entre un valor numérico y ROUND. La ubicación del punto decimal se ajusta a la ubicación del punto decimal de la pantalla del parámetro DISP. Si no desea cambiar este valor, pulse la tecla BMI para pasar al siguiente ajuste. Ejemplo: de ROUND a DISP. Si desea cambiar el valor, siga los pasos siguientes: 1. Pulse la tecla ENTER para cambiar el valor. 2. Pulse las teclas de flecha arriba/abajo para cambiar los parámetros disponibles. 3. Cuando haya terminado, pulse la tecla ENTER para pasar al siguiente parámetro (DISP).
DISP		0.0 0 0.0000 0.000 0.00	La pantalla alterna entre un valor numérico y DISP. Si no desea cambiar este valor, pulse la tecla BMI para pasar al siguiente ajuste. Ejemplo: de DISP a BAUD. Si desea cambiar el valor, siga los pasos siguientes: 1. Pulse la tecla ENTER para cambiar el valor. 2. Utilice las teclas de flecha arriba/abajo para cambiar los parámetros disponibles. 3. Cuando haya terminado, pulse la tecla ENTER para pasar al siguiente parámetro (BAUD).
BAUD	Velocidad de baudios	96 48 1152 576 384 288 192 144	El indicador solo muestra los dos primeros dígitos de la velocidad en baudios. La pantalla alterna entre un valor numérico y baudios. Si no desea cambiar este valor, pulse la tecla BMI para pasar al siguiente ajuste. Ejemplo: de BAUD a ATOL. Si desea cambiar el valor, siga estos pasos: 1. Pulse la tecla ENTER para cambiar el valor. 2. Utilice las teclas de flecha arriba/abajo para cambiar los parámetros disponibles. 3. Cuando haya terminado, pulse la tecla ENTER para pasar al siguiente parámetro (ATOL).

Tabla 4-1. Menú del modo de configuración (continuación)

Parámetro	Descripción	Opciones	Pasos
ATOL	Tolerancia inicial del algoritmo — El valor máximo es 255. Los valores superiores a 255 no le permitirán continuar y volverá al valor anterior.	Valor (10)	La pantalla alterna entre un valor numérico y ATOL . Si no desea cambiar este valor, pulse la tecla BMI para pasar al siguiente ajuste. Ejemplo: de ATOL a ALEN. Si desea cambiar el valor, siga los pasos siguientes: 1. Pulse la tecla ENTER para cambiar el valor empezando por el dígito situado más a la derecha. 2. Utilice las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar/disminuir los números. 3. Pulse la tecla BMI para desplazarse a la izquierda. 4. Cuando haya terminado, pulse la tecla ENTER para pasar al siguiente parámetro (ALEN).
ALEN	Exponente inicial del algoritmo — Valor máximo 10. Los valores superiores a 10, no le permitirán continuar y volverá al valor anterior.	Valor (8)	La pantalla alterna entre un valor numérico y ALEN . Si no desea cambiar este valor, pulse la tecla BMI para pasar al siguiente ajuste. Si desea cambiar el valor, siga los pasos siguientes: 1. Pulse la tecla ENTER para cambiar el valor empezando por el dígito situado más a la derecha. 2. Utilice las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar/disminuir los números. 3. Cuando haya terminado, pulse la tecla ENTER para pasar al siguiente parámetro (ATOUT).
ATOUT	Exponente máximo del algoritmo — El valor máximo es 15. Los valores superiores a 15, no le permitirán continuar y volverá al valor anterior.	Valor (10)	La pantalla alterna entre un valor numérico y ATOUT . Si no desea cambiar este valor, pulse la tecla BMI para pasar al siguiente ajuste. Si desea cambiar el valor, siga los pasos siguientes: 1. Pulse la tecla ENTER para cambiar el valor empezando por el dígito situado más a la derecha. 2. Utilice las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar/disminuir los números. 3. Pulse la tecla BMI para desplazarse a la izquierda. 4. Utilice las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar/disminuir los números. 5. Cuando haya terminado, pulse la tecla ENTER para pasar al siguiente parámetro (TOFF).
TOFF	Temporizador de apagado automático — Medido en minutos. 0 = siempre encendido. El máximo es de 9 minutos. Cuando se utiliza una fuente de alimentación externa, este parámetro es irrelevante	5 4 3 2 1 0 9 8 7 6	La pantalla alterna entre un valor numérico y TOFF . Si no desea modificar este valor, pulse la tecla BMI para pasar al siguiente ajuste. Pulse la tecla ENTER para pasar al siguiente parámetro, (UNITS). Si desea cambiar el valor, siga los pasos siguientes: 1. Pulse la tecla ENTER para cambiar los valores. 2. Utilice las teclas de flecha arriba/abajo para cambiar los parámetros disponibles. 3. Cuando haya terminado, pulse la tecla ENTER para pasar al siguiente parámetro (UNITS).
SPACE	Número de líneas nuevas tras la impresión	7	La pantalla alterna entre un valor numérico y SPACE . Si no desea modificar este valor, pulse la tecla BMI para pasar al siguiente ajuste. Pulse la tecla ENTER para pasar al siguiente parámetro, (UNITS). Si desea cambiar el valor, siga los pasos siguientes: 1. Pulse la tecla ENTER para cambiar los valores. 2. Utilice las teclas de flecha arriba/abajo para cambiar los parámetros disponibles. 3. Cuando haya terminado, pulse la tecla ENTER para pasar al siguiente parámetro (UNITS).

Tabla 4-1. Menú del modo de configuración (continuación)

Parámetro	Descripción	Opciones	Pasos
UNITS	Unidades — Selecciona la unidad de medida. Puede ser Kg/Lb, solo Kg o solo Lb	KG/LB KG LB	La pantalla alterna entre unidad de medida y UNIT . Si no desea cambiar este valor, pulse la tecla BMI para pasar al siguiente ajuste. Ejemplo: de UNITS a OP. Si desea cambiar el valor, siga los pasos siguientes: 1. Pulse la tecla ENTER para cambiar los valores. 2. Pulse las teclas de flecha arriba/abajo para cambiar el valor. 3. Cuando haya terminado, pulse la tecla ENTER para pasar al siguiente parámetro (OP).
OP	Opciones binarias: OP0 — Opciones de pesaje en vivo (0=desactivar, 1=activar) OP1 — Protocolo de comunicación (0=ESC, 1=mantenimiento) OP2 — Menú BMI (0=desactivar, 1=activar) OP3 — Alimentación del RTC (0=desactivar, 1=activar) OP4 — Semiautomático en vivo - (0=desactivar, 1=activar) OP5 — Cálculo completo - (0=espacial, 1=multiplicar por) (0=desactivar, 1=activar) OP6 — Tara - (0=desactivar, 1=activar) OP7 — Tipo de pila - (0=pilas secas, 1=pilas recargables) OP8 — Modo OIML - (0=desactivar, 1=activar)	OP0 OP1 OP2 OP3	La pantalla alterna entre una opción binaria y POO-0 . Si no desea cambiar este valor, pulse la tecla BMI para pasar a los siguientes ajustes Si desea cambiar el valor, siga los siguientes pasos: 1. Pulse ENTER para cambiar los parámetros. 2. Utilice las teclas de flecha arriba/abajo para seleccionar el valor de visualización que desea modificar. 3. Pulse la tecla BMI para desplazar el cursor intermitente. a. Utilice las flechas arriba/abajo para cambiar el valor. b. Pulse la tecla BMI para desplazar el cursor intermitente. 4. Pulse la tecla ENTER para guardar todos los parámetros de visualización. SAVE aparece en la pantalla. 5. Vuelva a pulsar la tecla ENTER y aparecerá DONE indicando que ya ha terminado de introducir todos los parámetros de la báscula.
Pulse la tecla BMI para volver a las opciones del menú de nivel superior, es decir: PROG/CALIB/DEF/DONE			

Tabla 4-1. Menú del modo de configuración (continuación)

4.4 Menú predeterminado

El menú predeterminado se utiliza para devolver la báscula a sus ajustes de fábrica y se muestra a continuación.

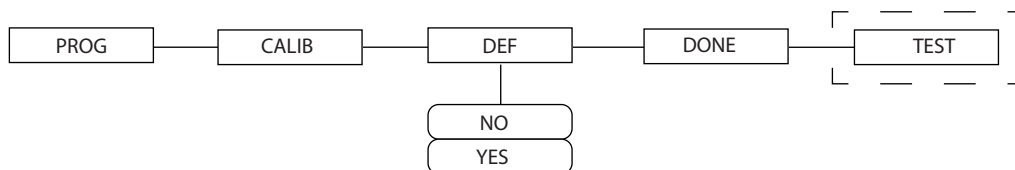


Figura 4-4. Menú predeterminado

Siga los siguientes pasos para restablecer los ajustes predeterminados de fábrica.

1. Pulse . La pantalla muestra un valor predeterminado de **NO**.
2. Para cambiar a **YES**, utilice y para ajustar el valor.
3. Pulse y la pantalla mostrará **DONE**.
4. Pulse para volver al menú de nivel superior PROG/CALIB/DEF/DONE.

NOTA: Si selecciona **YES** y pulsa se restablecerán los valores predeterminados de fábrica sin cambiar la calibración y volverá al modo **Weigh**.

4.5 Calibración de la báscula

Siga los pasos siguientes para calibrar la báscula.

1. Pulse simultáneamente y para encender la báscula.
2. La unidad realiza un ciclo por medio de su función de arranque y continúa mostrando la versión del software. Siga manteniendo pulsadas ambas teclas hasta que aparezca **ld**.
3. Acceda al interruptor de configuración situado en la parte posterior de la báscula para introducir los parámetros de configuración de la báscula. Utilice un pequeño clip, un destornillador pequeño u otro objeto similar para pulsar el interruptor de configuración situado en la parte posterior del indicador (debajo de la tapa).
4. Aparece **Prog**. Pulse para desplazarse por el menú de parámetros.
5. Aparece **Calib** y se accede a los parámetros de calibración.
6. Pulse y aparecerá un valor numérico que representa la cantidad de peso que se utiliza para la calibración.
Lb parpadeará. Para cambiar entre lb y kg, pulse o . Una vez seleccionada una unidad, pulse y el dígito situado más a la derecha parpadeará.
7. Para cambiar el valor de la carga de calibración, pulse o para aumentar/disminuir el dígito parpadeante.
8. Utilice para mover el dígito parpadeante hacia la izquierda o la derecha.
9. Una vez introducidos todos los dígitos, pulse y aparecerá **Clear**.
10. Asegúrese de que la plataforma de la báscula está libre de peso y pulse de nuevo y a continuación aparece **=====**.
11. Una solicitud para poner la carga elegida en la plataforma se muestra mediante **Put xxx.xx**.

12. Coloque el peso elegido en la plataforma y pulse . Aparecerá ===== y, a continuación, **Save**.
13. Pulse de nuevo  y la pantalla indicará **Done**.
14. Pulse tres veces  para salir de nuevo al parámetro **Done** del nivel superior.
15. Pulse  para volver al modo **Weigh**.
16. Para salir de la calibración sin cambiar el cero o el span de la calibración existente, pulse , después pulse .

4.6 Menú de prueba

Para acceder al menú **TEST**, siga los siguientes pasos.

1. Pulse simultáneamente  y  para encender la báscula hasta que parpadee **ID**.
2. Pulse . Pulse  para acceder al menú de prueba.
3. Siga pulsando  para desplazarse por las distintas opciones del menú.
4. Una vez completado, pulse  hasta que aparezca **Done**.
5. Pulse  para iniciar el proceso de pesaje.

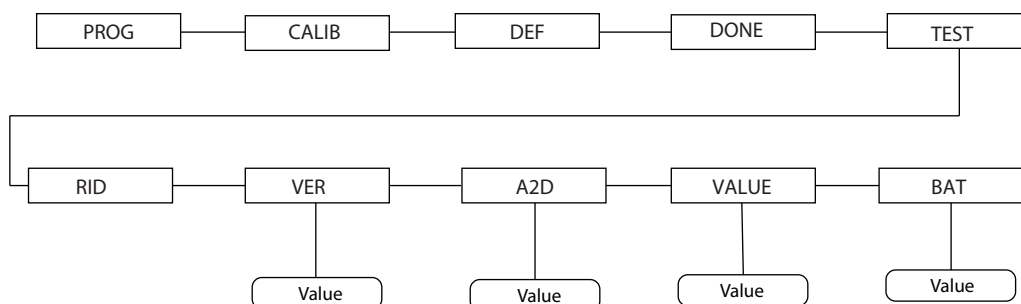


Figura 4-5. Menú de prueba

Parámetro	Opción	Descripción
RID	Valor	Número de identificación interno
VER	Valor	Muestra la versión actual del software
BAT	Valor	Muestra el nivel actual de la batería
VALUE	Valor	Muestra el valor real
A2D	Valor	Muestra los recuentos brutos reales de la báscula

Tabla 4-2. Menú de prueba

5.0 Comunicación

La unidad incluye un puerto RS-232 que permite transmitir los datos de peso a otros equipos, como una computadora o una impresora. El cable RS-232 con conector DB-9 (n.º de ref. 100719) está disponible en Rice Lake Weighing Systems. Esa conexión se muestra en el apartado Conexión USB de la página siguiente.

Los parámetros RS-232 son:

- 9600 baudios (seleccionable en el modo de programación)
- 8 bits de datos
- 1 bit de parada
- sin paridad
- sin comunicación

Existen tres métodos de comunicación:

- Impresión por teclado de pulsadores
- Protocolo remoto estándar
- Protocolo de escape

5.1 Impresión por teclado de pulsadores

Con un peso estable y en rango, mantenga pulsado  durante al menos tres segundos, o hasta que la báscula emita dos pitidos rápidos.

 **NOTA:** Si la báscula no emite ningún pitido al cabo de cinco segundos, suelte  ya que el peso estaba en movimiento o fuera de rango.

Si muestra el peso y no el IMC, la báscula enviará la siguiente cadena de 21 caracteres:

xxxxxxxx<SP>uu<SP>mmmmm<SP><CR><LF>

Token	Descripción
xxxxxxxx	Peso con punto decimal y signo "-"
<SP>	Espacio
uu	Unidad - lb o kg
mmmmm	Modo - bruto o neto
<CR>	Retorno de carro
<LF>	Avance de línea (desplaza el cursor a la línea siguiente)

Tabla 5-1. Tokens de formato de impresión

Ejemplo:

-10 Lb net = <SP><SP><SP><SP>-10.0<SP>lb<SP><SP>Net<SP><SP><SP><CR><LF>

10 Lb gross = <SP><SP><SP><SP><SP>10.0<SP>lb<SP>Gross<SP><CR><LF>

- La báscula enviará los siguientes datos mientras se encuentre en el modo **BMI** (mostrando el valor del IMC):

Ajuste	Valor
Peso bruto	215 Lb
Peso de tara	0.0 Lb
Peso neto	215 Lb
Altura del paciente	6-01,0 pies
IMC del paciente	28.4

Tabla 5-2. Datos de IMC

5.2 Conexión USB

La báscula tiene capacidad para conectarse a una computadora con Windows® (PC) mediante un cable USB (no incluido) y un programa de emulación de terminal. Un programa de emulación de terminal permite la transferencia de datos entre la báscula y la PC mediante un puerto serial.



Figura 5-1. Puertos de conexión

NOTA: Las computadoras Apple® y Macintosh® no pueden transferir los datos necesarios a la báscula. Utilice solo una PC para la transferencia de datos.

La conexión del software y las descargas siempre deben ser tratadas por el departamento de IT por razones de seguridad y pueden variar en función del tipo de plataforma informática que se utilice.

NOTA: Consulte al departamento de IT si las protecciones de los controladores impiden el uso del controlador USB. Puede que sea necesario desactivar temporalmente las protecciones de los controladores en computadoras con Windows 10 o posterior para permitir la instalación del controlador USB.

1. Conecte el indicador de la báscula a una PC mediante un cable USB-Tipo B a USB-Tipo A (no incluido).
2. Encienda el indicador.

NOTA: En la mayoría de casos, la PC debería encontrar el controlador y configurarlo automáticamente al conectar la báscula a un puerto USB.

3. Abra un programa de emulación de terminal, como Advanced Serial Port Terminal, pUttY o Hercules (utilizado en este ejemplo).
4. Conéctese al puerto serie asignado por la PC (COM5 en el ejemplo). Esto se puede encontrar en el Administrador de dispositivos. Una vez seleccionado, pulse **Abrir**.

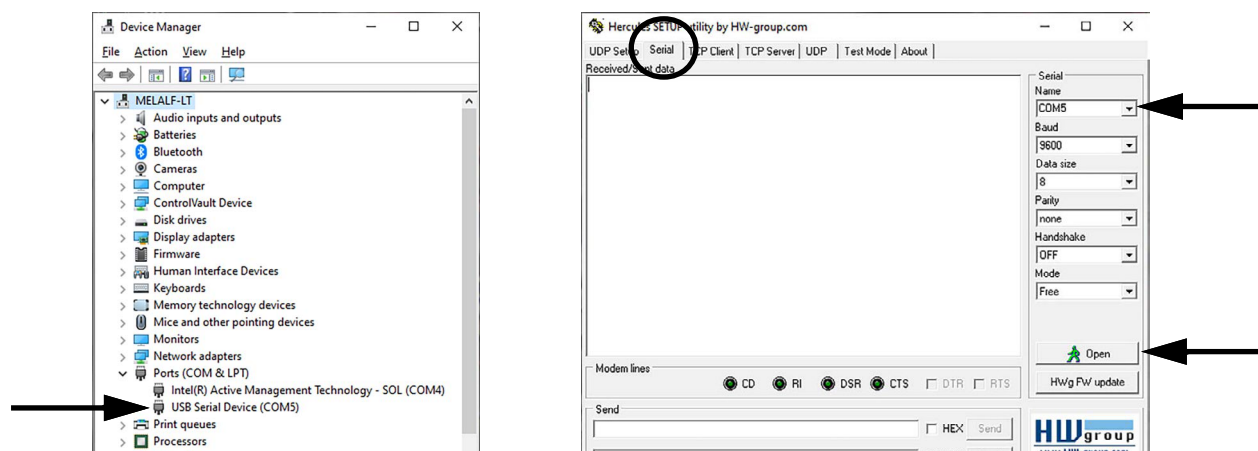


Figura 5-2. Conexión a un puerto serial

5. Con el peso en la báscula, mantenga pulsado el botón **Print** del indicador durante tres segundos. El peso del paciente se envía a la computadora.

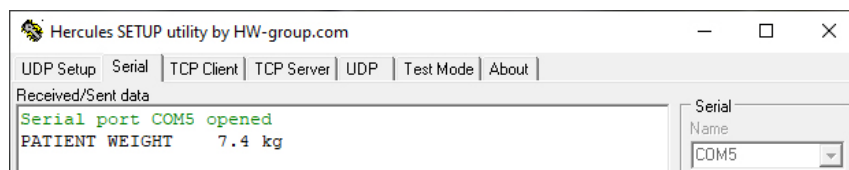


Figura 5-3. Peso del paciente visualizado

6.0 Mantenimiento

El siguiente apartado proporciona instrucciones para el mantenimiento y la limpieza de la unidad.

6.1 Mantenimiento básico



IMPORTANTE: Antes del primer uso y tras periodos de inactividad, compruebe que la báscula y las pilas funcionan correctamente. Si la báscula no funciona correctamente, diríjase a personal de servicio calificado.

Compruebe el aspecto general de la báscula en busca de daños, desgaste o roturas.

Compruebe si las pilas están dañadas o desgastadas. No la utilice si está dañada.

Inspeccione el adaptador de CA para ver si el cable está agrietado o deshilachado o si las clavijas están rotas o dobladas.

En los modelos con indicadores alimentados por pilas secas, retire las pilas antes de los periodos de inactividad.



ADVERTENCIA: Las operaciones de mantenimiento no mencionadas en esta sección, deben ser realizadas por personal de servicio calificado.

6.2 Limpieza

El cuidado y la limpieza adecuadas son fundamentales para garantizar una vida útil prolongada de funcionamiento preciso y eficiente.



ADVERTENCIA: Desconecte la báscula de la fuente de alimentación CA antes de limpiarla.

- Limpie todas las superficies externas con un pañuelo o paño limpio y húmedo. Puede utilizarse una solución suave de agua y jabón. Seque con un paño limpio y suave.
- No sumerja la báscula en soluciones de limpieza u otros líquidos
- No utilice alcohol isopropílico ni otras soluciones para limpiar la superficie de la pantalla.

6.3 Sustitución de pilas alcalinas

Cuando aparezca una indicación de carga baja de las pilas, siga las instrucciones para cambiar las pilas.



ADVERTENCIA: Antes de sustituir las pilas, desconecte la báscula de la fuente de alimentación CA.

1. Apague la báscula.
2. Desconecte la báscula de la fuente de alimentación CA.
3. Abra y retire la tapa de las pilas.
4. Sustituya las pilas por un juego nuevo de 6 pilas AA de 1,5 V.
5. Vuelva a colocar la tapa de las pilas.
6. Encienda la báscula.



IMPORTANTE: Deseche las baterías en centros de recolección de residuos apropiados al final de su ciclo de vida de acuerdo con las leyes y regulaciones locales. Las baterías y baterías recargables pueden contener sustancias nocivas que no deben desecharse con la basura doméstica. Las baterías pueden contener sustancias nocivas que incluyen, entre otras, cadmio (Cd), litio (Li), mercurio (Hg) o plomo (Pb). Los usuarios que eliminan las baterías de forma ilegal se enfrentarán a las sanciones administrativas previstas por la ley.



ADVERTENCIA: La colocación inadecuada de las pilas provocará daños en las mismas y puede incendiarlas.

6.4 Sustitución de pilas recargables



ADVERTENCIA: Antes de sustituir las pilas, desconecte la báscula de la fuente de alimentación CA.

Siga las siguientes instrucciones para sustituir las pilas:

1. Apague la báscula.
2. Desconecte la báscula de la fuente de alimentación CA.
3. Abra y retire la tapa de las pilas.
4. Inserte el paquete de pilas recargables.
5. Vuelva a colocar la tapa de las pilas.
6. Encienda la báscula.



IMPORTANTE: Deseche las baterías en centros de recolección de residuos apropiados al final de su ciclo de vida de acuerdo con las leyes y regulaciones locales. Las baterías y baterías recargables pueden contener sustancias nocivas que no deben desecharse con la basura doméstica. Las baterías pueden contener sustancias nocivas que incluyen, entre otras, cadmio (Cd), litio (Li), mercurio (Hg) o plomo (Pb). Los usuarios que eliminen las baterías de forma ilegal se enfrentarán a las sanciones administrativas previstas por la ley.



ADVERTENCIA: La colocación inadecuada de las pilas provocará daños en las mismas y puede incendiarlas.

6.5 Mantenimiento periódico

Consulte la siguiente tabla para conocer las pautas de mantenimiento periódico:

Tarea	Proceso	Diario/Semanal	Trimestral	Según la normativa local
Limpieza de rutina	Elimine la suciedad, el polvo y los residuos	X		
Asegúrese de que la báscula esté nivelada	Compruebe el nivel y ajuste las patas de la báscula según sea necesario	X		
Compruebe la repetibilidad y la precisión	Coloque un mínimo del 5% de la capacidad total de la báscula tres veces en cada cuadrante		X	
Inspeccione si hay daños	Compruebe el adaptador de alimentación de CA, las bisagras, etc. en busca de daños visibles o piezas faltantes		X	
Calibre	Complete una calibración certificada			X
Certificación	Revise y renueve las certificaciones de pesas de prueba			X

Tabla 6-1. Mantenimiento periódico

7.0 Especificaciones

Alimentación

120 VCA - 9 VCC - 60 Hz / 230 VCA - 9 VCC - 50 Hz

Tipo de pila

6 pilas alcalinas de tamaño AA

Consumo de pilas

25 horas de uso continuo

Se puede configurar el apagado automático

Comunicaciones de datos

RS-232 con conector RJ-45

Velocidad en baudios seleccionable, predeterminado - 9600

8 bits

Sin paridad

1 bit de parada

Sin comunicación

Requisitos ambientales

Temperatura de funcionamiento 14 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F)

Temperatura de almacenamiento 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)

Humedad Humedad relativa del 85

Uso en presión atmosférica 700 - 1060 kPa

Capacidad

250 kg x 100 g (550 lb x 0,2 lb)

Medidas

Plataforma de báscula 37,5 cm An x 37,5 cm L x 7,6 cm Al (14,7 pulg. An x 14,7 pulg. L x 3 pulg. Al)

Altura total 123 cm (48,4 pulg.)



© Rice Lake Weighing Systems Contenido sujeto a cambio sin previo aviso.

230 W. Coleman St. • Rice Lake, WI 54868 • EE.UU. EE.UU.: 800-472-6703 • Internacional: +1-715-234-9171